



Hamilton C1 Neo

اجزای جلوی دستگاه

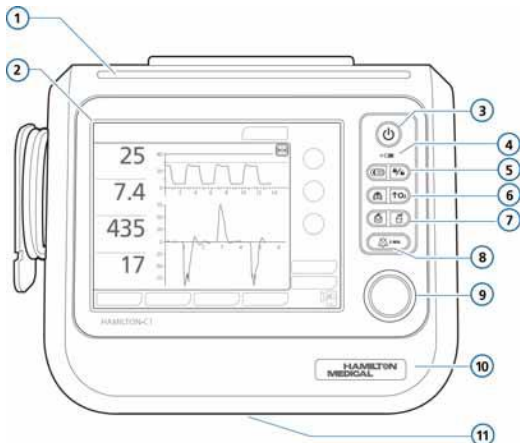


1. LED رنگی هشدار	2. صفحه نمایش لمسی	3. دکمه روشن / خاموش کردن دستگاه و حالت Standby
4. نمایشگر میزان شارژ باتری	5. دکمه حالت شب و روز برای نور صفحه نمایش	5. دکمه قفل کردن صفحه نمایش و باز کردن آن
6. دکمه تنفس دستی و نگه داشتن زمان دم	6. دکمه برای افزایش ۱۲۵ درصد آخرین اکسیژن دریافتی بیمار برای ۲ دقیقه	7. دکمه عکس گرفتن از صفحه و ذخیره روی فلش مموری
7. روی این دستگاه کار نمی کند	8. دکمه ساکت کردن هشدار برای ۲ دقیقه	9. دکمه گردان و تایید کننده تنظیمات دستگاه و انتخاب گزینه های منوی دستگاه
10. کاور جلویی و جایگاه باتری دستگاه	11. زیر دستگاه و جایگاه فرار سیال در شیر بازدمی	

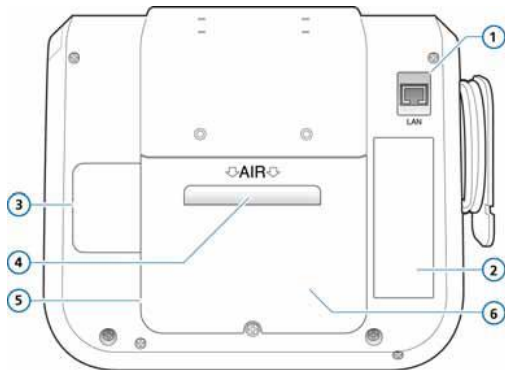


اجزای پشت دستگاه

1. پورت LAN دستگاه	2. لیبل اطلاعات دستگاه	3. محل سنسور اکسیژن دستگاه
4. فیلتر هوا	5. کاور پشتی دستگاه	6. محل قرارگیری HEPA فیلتر

اجزای کناره های دستگاه

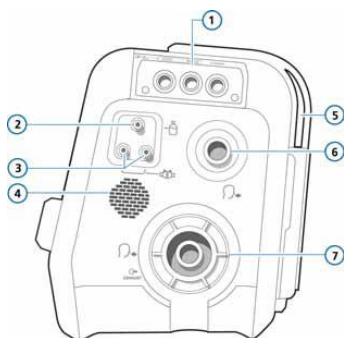


1. درگاه های اختیاری دستگاه	2. برای این دستگاه کاربرد ندارد (اتصال نبولایزر)	3. محل اتصال فلو سنسور دستگاه همیلتون
4. بلندگوی دستگاه	5. خنک کننده ونتیلاتور	6. دریچه اتصال ست دم
7. محل اتصال شیر بازدمی و ست بازدم		

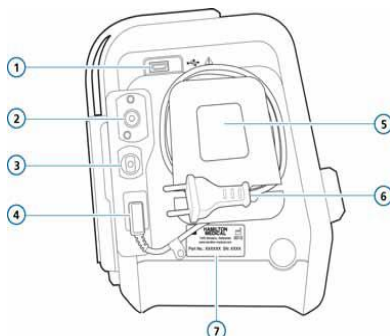

1. درگاه USB برای دستگاه	2. ورودی اکسیژن پرفشار	3. ورودی اکسیژن کم فشار
4. محل سیم اتصال سیم برق به دستگاه	5. خنک کننده ونتیلاتور	6. سیم برق دستگاه
7. لیبل شماره سریال دستگاه		

آشنایی با تنظیمات صفحه نمایش

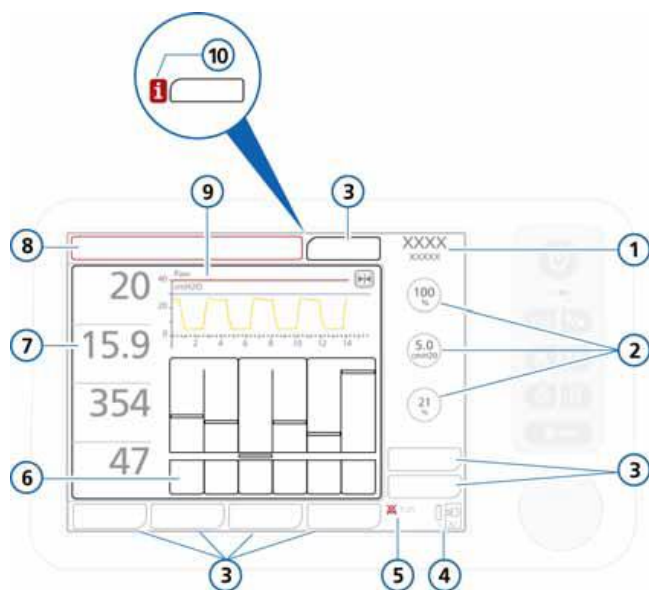

۱. مود درمانی انتخاب شده
۲. پارامترهای کنترلی اصلی FiO_2 , Flow , PEEP
۳. پنجره های انتخابی برای تنظیمات بیشتر
۴. علامت ورودی منبع ورودی (باتری یا برق)
۵. علامت سکوت هشدار و نمایشگر زمان اتمام آن
۶. پارامترهای گرافیکی دستگاه (waveform , trend , loop , vent)
۷. متغیر های نمایشی اندازه گیری شده توسط دستگاه
۸. پنجره نمایش هشدار با رنگ
۹. نمودار فشار بر اساس زمان دستگاه (نمودار اصلی و دائمی دستگاه)
۱۰. نمایشگر هشدارها و اتفاقات روی داده در دستگاه

نحوه شروع کار با دستگاه

- ابتدا دستگاه را به برق زده و با دکمه مربوطه روشن می کنیم
- پس از انجام تست های داخلی توسط خود دستگاه که شامل درگاه ها و شیرهای دستگاه و آلارم دستگاه می شود ، دستگاه وارد منوی کلی درمانی می شود
- پس از انجام تنظیمات مربوطه که شامل وزن بیمار و ... می شود می توان وارد مود مورد نظر شد و درمان را شروع کرد
- برای ورود به هر مود درمانی اگر نیاز به کالیبره کردن باشد دستگاه به شما هشدار و پیام مربوطه را می دهد
- با فشردن دکمه روشن/خاموش دستگاه از شما فعال شدن حالت Standby را سوال می کند که در صورت تایید کردن مود درمانی در حال اعمال قطع می شود که به معنای اتمام مود درمانی می باشد و اگر برای مدت ۵ تا ۱۰ ثانیه دکمه روشن/خاموش را نگه دارید دستگاه خاموش می شود .
- برای شما مود های حجمی و فشاری و غیر تهاجمی به صورت گروه بندی مشخص شده اند که شما می توانید هر مود را از هر گروه انتخاب نمایید زیرا مود های مختلف در دستگاه های مختلف دارای اسامی بسیار زیادی می باشند .
- اگر از حالت اکسیژن کم فشار استفاده می کنید باید تنظیمات دستگاه را بر روی LPO قرار دهید .
- در صورت بروز هر گونه مشکل و سوال حتما با کارشناس شرکت تماس بگیرید .